



STANDARD F200

Software Update Guide



Užívateľská príručka na aktualizáciu Software

Táto príručka obsahuje všetky informácie potrebné na aktualizáciu software analyzátoru F200. Aktualizácia software je povinný postup na zachovanie a vylepšenie funkcie STANDARD F200.

Eurolab Lambda, a.s.
T.Milkina 2 * 917 01 Trnava
Slovenská republika
Tel.: 033/5341 448-9 * Fax: 033/5443 094
e-mail: eurolablambda@eurolablambda.sk * www.eurolambda.sk

Servisný dispečing: 0903 201 270

Potrebný materiál

- Analyzátor STANDARD F200
- Súbor na aktualizáciu Software (FluroTest_V.x.xx_Rxxx.bin alebo FluroTest.bin)
- USB
- Osobný počítač

Ako aktualizovať analyzátor F200

1. Príprava USB pamäte pre aktualizáciu software F200


- 1) Pripravte USB pamäť pre aktualizáciu software F200.
- 2) Naformátujte USB súborom „**FAT32**“
- 3) Na USB stiahnite „**FluroTest_V.x.xx_Rxxx.bin** alebo **FluroTest.bin**“

2. Pripojenie USB do analyzátoru F200

- 1) Zasuňte USB do portu v analyzátoře F200.
- 2) Na LCD obrazovke analyzátoru sa zobrazí obrázok USB.

3. Aktualizácia software analyzátoru F200


- 1) Na obrazovke zvolte menu **Supervisor**.

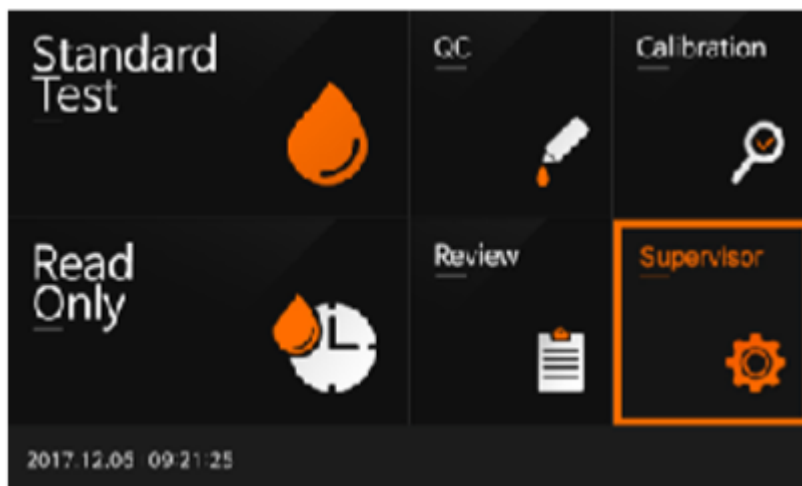

- 2) Zadajte heslo **0000**.



- 3) Zvoľte **Update** menu.

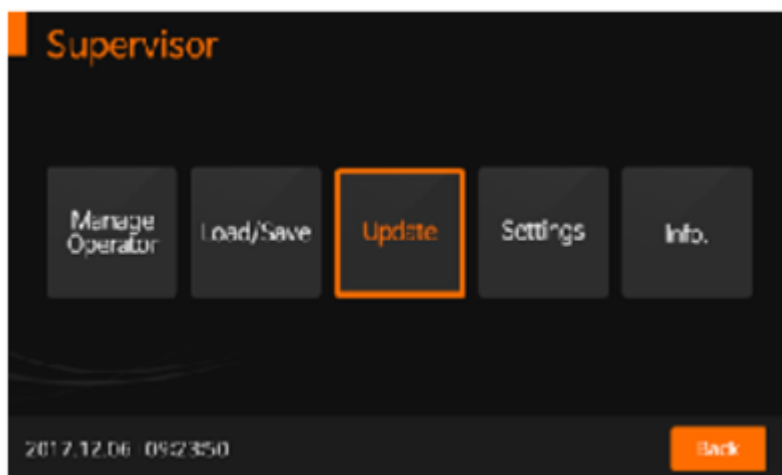

- 4) Zvoľte **S/W Update** menu.



- 5) Stlačte tlačítko **OK**.



- 6) Aktualizácia software sa ukončí automaticky.
7) Po ukončení aktualizácie prebehne proces reštartu systému a prístroj sa automaticky vypne.

UPOZORNENIE:

Reštart po SW aktualizácii môže v niektorých prípadoch trvať aj 15-30 minút. Počas reštartu nesmieste prístroj v žiadnom prípade vypnúť!

Pri jeho vypnutí počas reštartu dôjde ku nenávratnému poškodeniu!